

نکات مهم پیش از استفاده کنترل خون:

- ۱- پس از بیرون آوردن ویال از یخچال صبر کنید تا به دمای محیط برسد. (این زمان نباید بیشتر ۱۰-۸ دقیقه باشد)
- ۲- به مدت ۲۰-۱۵ ثانیه ویال را در حالت عمودی و وارونه بین کف دو دستتان قرار دهید و مانند زمانی که از شدت سرما دستهایتان را به هم می مالید ویال را مالش دهید.
- ۳- برای ۵ دقیقه ویال را روی میکسر قرار دهید.
- ۴- مرحله شماره ۲ را تکرار کنید.
- ۵- برای ۵ مرتبه ویال را به صورت عمودی و وارونه به آرامی میکس کنید.
- ۶- درب ویال را باز کنید و از کنترل خون جهت خوانش دستگاه سل کانتر خود استفاده نمایید، پس از مصرف اطراف لوله را کاملاً پاک کرده و درب آن را ببندید، دقت نمایید که هیچگونه گردو خاک و یا مواد خارجی دیگری به داخل ویال و یا درب آن وارد نشود.
- ۷- پس از استفاده، ویال را فوراً در درجه حرارت ۸-۲ درجه سانتیگراد (درون یخچال) نگهداری کنید.

رعایت تاریخ انقضاء کنترل خون بر اساس تاریخ تعیین شده از سوی کمپانی که بر روی ویالها درج می گردد و همچنین رعایت مدت **Open vial** (تاریخ باز کردن ویالها توسط آزمایشگاه) الزامی می باشد زیرا مطابقت پارامترها با نتایج حاصله ارتباط تنگاتنگی با این دو عامل را داراست.

توجه داشته باشید که نتایج حاصله با توجه به دقت دستگاههای مختلف، متفاوت می باشد و کنترل خون اساساً جهت بررسی دقت عملکرد دستگاه و آشکارسازی معایب سیستم نظیر نیاز به سرویس و کالیبره نمودن مورد استفاده قرار می گیرد، لذا در صورت عدم رفع مشکل ابتدا به جدول ذیل مراجعه نمایید سپس با این شرکت تماس حاصل فرمایید در صورتیکه مغایرت به دلیل مشکل دستگاهی می باشد باید با نمایندگی و سرویسکار دستگاه تماس بگیرید.

به هیچ وجه ویالها را داخل فریزر و همچنین روزانه به مدت بیش از ۱۵ دقیقه در دمای محیط قرار ندهید.

